

## Mascarillas sanitarias Tipo IIR

### Instrucciones de etiquetado:

- Producto sanitario de clase I no estéril.
- Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para el tipo IIR (Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE), Respirabilidad y Resistencia a las salpicaduras).
- Mascarilla de un solo uso
- Lote de fabricación: xxxx
- Cantidad de productos contenidos en el embalaje (p.ej. 50 unidades)
- Fabricante: xxxx (Debe incluir NOMBRE / DIRECCIÓN / CIF)
- Nº de la autorización expresa emitida por la AEMPS
- Fecha de caducidad de los productos.

### Instrucciones de confección:

#### MASCARILLA CON TRES PLIEGUES Y ELÁSTICOS LATERALES

##### Descripción:

Medidas de la mascarilla terminada en plano: 9,5 x 18 cm

La parte superior lleva un dobladillo de 1,5 cm con un twisband en su interior para el ajuste


La parte inferior lleva un dobladillo de 1 cm

En la zona central lleva tres pliegues de 2 cm

Los cordones elásticos laterales tienen una longitud de 20 cm cada uno

Los laterales van rematados con vivo del tejido exterior (pieza de 9,5 cm x 3 cm) asean los bordes y sujetan la goma.

##### Patrón acotado:

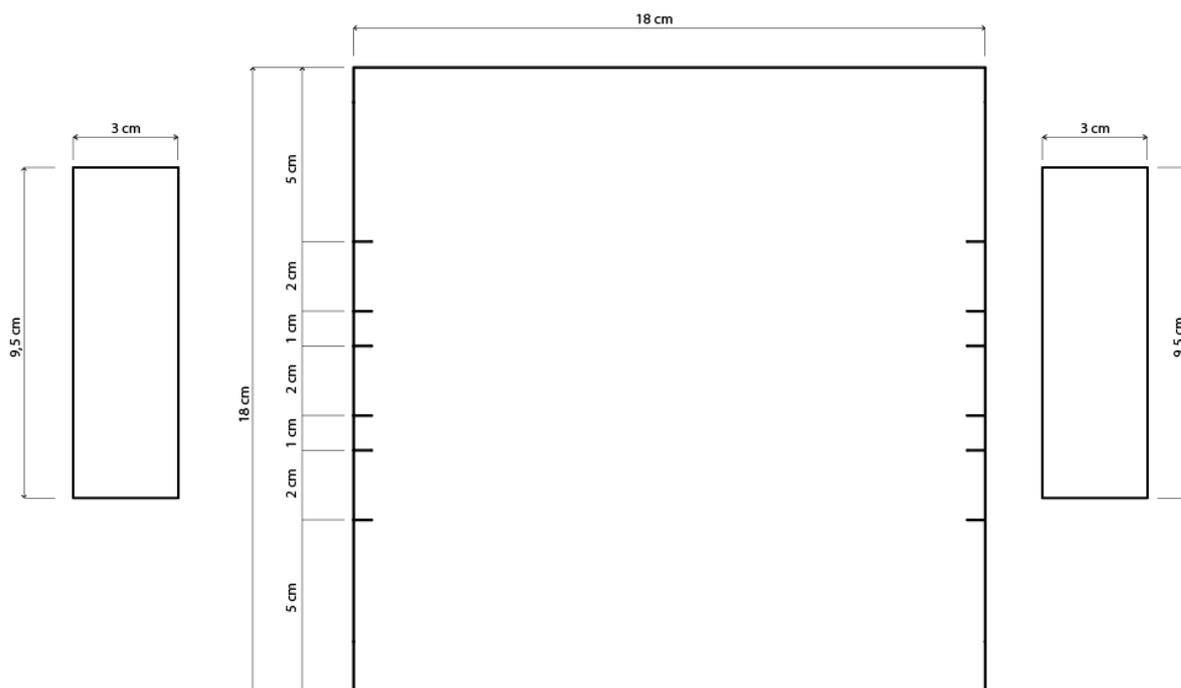

##### Material necesario:

“Sándwich” de tejidos compuesto por cinco capas:

- 2 capas de tejido exterior (tejido referencia 2)
- 2 capas de tejido intermedio (tejido referencia 1)
- 1 capas de tejido interior en contacto con la boca (tejido referencia 3)

2 vivos (de 9,5 x 3) del tejido exterior (polipropileno 40 gr)

2 cordones elásticos de 21 cm cada uno

1 tira twist band de 15 cm aproximadamente

Hilo

Equipamiento para la confección:

Maquina plana

Regulación de puntada a 4

Aguja de punta de bola N° 80

Confección:

IMPORTANTE. Tanto dobladillos como bieses no deben coserse al canto para obtener mayor resistencia en caso de lavado. Es necesario dejar suelto parte del tejido (0,5 cm)

Borde superior: dobladillar a 1,5 cm introduciendo en su interior la tira twist band. Pasar pespunte a 1 cm, dejando 0,5 cm

Borde inferior: dobladillar a 1 cm el borde inferior, pasar pespunte a 0,5 cm

Sujetar en laterales los tres pliegues centrales según los piquetes (tres pliegues de 2 cm)

Sujetar el cordón elástico en las esquinas

Coser los vivos laterales a “bocadillo” doblando por la mitad y pespunteando a la mitad. No redoblar, dejar bordes sueltos.

